

Hoe start uw muziek medicatie?


Activeer de
hoofdtelefoon door de
⏻ knop aan de
onderzijde in te
drukken en tik op **start**.



Beantwoord de vragen
daarna door te kiezen
voor **volwassen** en
operatie.



Nu kunt u meerdere
muziekgenres die u
wenst (de)selecteren.

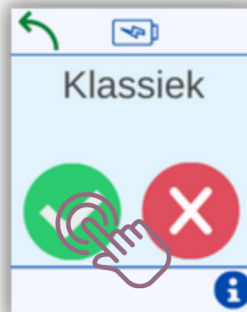

Controleer uw keuzes.
Zet de hoofdtelefoon op
en ontspan.

**N.b. wanneer de hoofdtelefoon niet opstart, druk dan
tegelijkertijd 5 seconden op de resetknoppen.**

Display toetsen

Volume toetsen



Vorige pagina



Volgende pagina



Ja / Keuze accepteren



Nee / Keuze afwijzen



Pauze toets



Afspeel toets



Volgend nummer



Hoofdtelefoon knoppen

Aan / uit



Pauze / play



Volumeknoppen



Reset 5 sec inhouden



music4five
your health benefits!